

LABORATOIRE **LPC**
UN PAS DE PLUS VERS LE CHEVAL



Soin de la robe
et de l'épiderme

ALUFILM

Produit d'hygiène cutanée

Produit de soin pour chevaux

- Protège des contaminations extérieures
- Absorbe les sécrétions

Le pansement spray ALUFILM est un spray cutané qui constitue une **barrière physique contre les contaminations extérieures**. Poudre d'aluminium micronisée, forme un écran protecteur en séchant.

Mode d'emploi

Bien agiter. Vaporiser à 20 cm après nettoyage au jet d'eau et désinfection. Renouveler l'application pendant plusieurs jours. A n'utiliser qu'après nettoyage et désinfection. En cas de blessures étendues ou profondes, contacter un vétérinaire.

PRECAUTIONS : Danger : Aérosol extrêmement inflammable. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou d'appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'incendie, utiliser du sable, de la terre, une poudre chimique ou de la mousse. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Ne pas respirer les vapeurs. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

PRESENTATION EN
SPRAY
FACILE ET PRATIQUE
D'UTILISATION



Spray de 300 ml

Composition

Poudre d'aluminium micronisée, Alcool éthylique, Gaz butane.




Fabrication
FRANÇAISE



Saisonnalité

Toute l'année

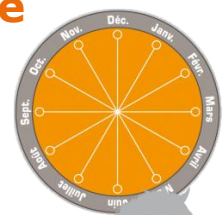

20180205

Laboratoire LPC
BP 38001 – Pont-Réan – 35580 GUICHEN
Tél. 02 99 42 84 00 – Fax 02 99 42 29 55
www.laboratoirelpc.com – contact@laboratoirelpc.com

